

IDEXX VetLab Station

Guida di consultazione rapida

Per ulteriori informazioni sull'uso della IDEXX VetLab* Station (come l'aggiunta di test a un'analisi, la riassegnazione dei risultati e l'immissione dei risultati del test SNAP*), visitare idexx.com/product-info e/o learn.idexx.com.



Navigazione nella Schermata Home

Icone di stato dello strumento

Permettono di sapere quali strumenti sono in esecuzione e/o disponibili attraverso icone codificate a colori.

- **Verde (pronto)** – Connesso e comunicante
- **Giallo (occupato/standby)** – In uso o in modalità standby
- **Grigio (offline)** – La connessione si è interrotta
- **Rosso (avviso)** – Si è verificato un problema: premere l'icona per ulteriori informazioni

Lista In attesa o

Lista Censimento

Se si dispone di un sistema integrato di gestione delle informazioni della struttura (PIMS), è possibile modificare le impostazioni della schermata Home per includere una lista In attesa e/o una lista Censimento; una volta abilitata, utilizzare la freccia a discesa per scegliere la lista che si desidera visualizzare:

- **Lista in attesa:** consultare una lista dei pazienti che presentano richieste aperte del PIMS integrato e selezionare un nome paziente per avviare l'analisi di un campione. È possibile anche utilizzare l'icona Elimina per eliminare i pazienti selezionati dalla lista In attesa.
- **Lista Censimento:** consultare una lista dei pazienti che sono stati registrati nella clinica attraverso il PIMS integrato e selezionare il nome del paziente per avviare l'analisi di un campione.

Tasto Ricerca

Cliccare per cercare un paziente specifico nella lista In attesa o Censimento (quella visualizzata) e avviare l'analisi di un campione.

Tasto Aggiungi/Analizza campione

Cliccare per inserire manualmente le informazioni del paziente e avviare l'analisi di un campione.

Lista In corso

Visualizzare quali test sono ancora in esecuzione, sono in attesa di essere eseguiti o richiedono un'azione.

Centro messaggi

Cliccare per visualizzare le notifiche da IDEXX.

Indicatore IDEXX SmartService

Il colore del pallino indica lo stato della connessione di IDEXX SmartService* Solutions:

- **Verde** – Connesso
- **Giallo** – Connessione in corso
- **Grigio** – Disabilitato
- **Rosso** – Offline

Icona ingranaggio

Cliccare per aprire un menu in cui si può accedere a schermate specifiche dello strumento, personalizzare le impostazioni, ricevere assistenza, visualizzare i messaggi o spegnere il sistema.

Visualizzare l'icona di tutti i risultati


Cliccare su per visualizzare tutti i risultati storici diagnostici interni per paziente.

Tasto Ricerca risultati

Cercare una cartella clinica specifica.

Lista Risultati

Consultare una lista dei risultati del paziente interni, creata negli ultimi 7 giorni. Cliccare per selezionare un paziente e visualizzarne o stamparne i risultati.

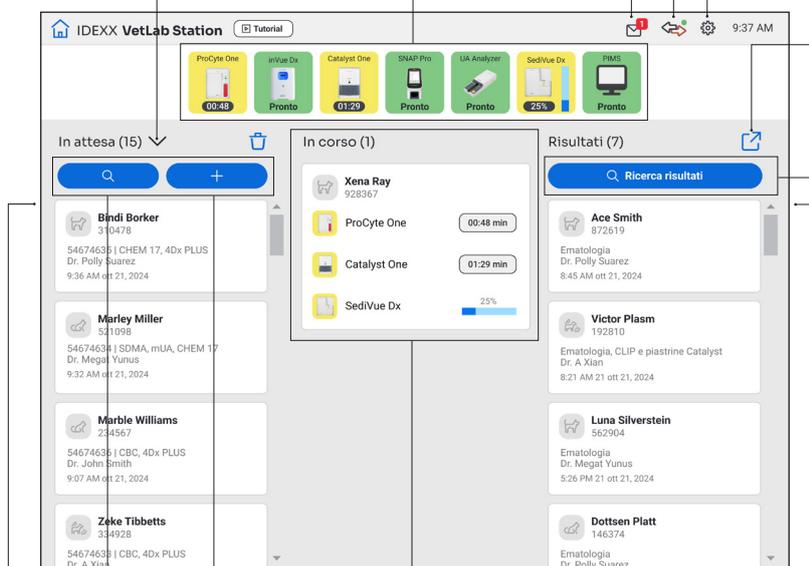

Avvio dell'analisi di un campione con un PIMS integrato

1. Selezionare il paziente desiderato dalla lista **In attesa** o **Censimento** nella Schermata Home o cliccare  per cercare un paziente nella lista **In attesa** o **Censimento**.
2. Selezionare uno o più strumenti desiderati e premere **Esegui**.

Avviare l'analisi del campione direttamente su IDEXX VetLab Station.

1. Selezionare  o  nella Schermata Home.
2. Selezionare/Inserire le informazioni del paziente:
 - + **Se si tratta di un nuovo paziente:**selezionare **Aggiungi nuovo paziente**, inserire le informazioni sul paziente/cliente, quindi cliccare su **Avanti**. Confermare/specificare le informazioni sul paziente/struttura, selezionare le icone dell'uno o più strumenti desiderati e premere **Esegui**.
 - + **Se è un paziente già presente nel sistema:**selezionare la casella **Paziente**, **Cognome** o **ID cliente**, quindi digitare le informazioni pertinenti. Selezionare il paziente desiderato dalla lista e premere **Avanti**. Confermare/specificare le informazioni sul paziente/struttura, selezionare le icone dell'uno o più strumenti desiderati e premere **Esegui**.
 - + **Se si tratta di un paziente in emergenza:**selezionare **Stat**. Selezionare la **Specie** e **Fascia d'età**. Il sistema inserisce automaticamente una marca temporale univoca per identificare il paziente (che può essere utilizzata in seguito durante la riassegnazione dei risultati del test). Selezionare **Avanti**.
3. Selezionare uno o più strumenti desiderati e premere **Esegui**.

Inserire/modificare manualmente i risultati del test SNAP

Per inserire manualmente i risultati del test SNAP:

1. Premere sull'icona **SNAP** nella lista **In corso** o su **Inserisci risultati** nella finestra di dialogo **Timer SNAP** completato.
2. Selezionare l'immagine che corrisponde alla finestra dei risultati del test SNAP.
3. (Opzionale) Selezionare la scheda **Commenti** e poi inserire il proprio ID utente e un commento per questo risultato del test.
4. Cliccare **Salva**.

Per modificare i risultati del test SNAP:

1. Dalla schermata dei risultati, cliccare su **Gestisci risultati**.
2. Cliccare su **Modifica i risultati manualmente** e poi selezionare il risultato del test SNAP da modificare.
3. Apportare le modifiche e cliccare su **Salva**.

Inserire manualmente le proprietà fisiche e chimiche delle analisi delle urine

Per aggiungere le proprietà chimiche e fisiche delle urine durante l'esecuzione:

1. Avviare un'esecuzione delle analisi delle urine.
2. Quando viene richiesto, selezionare una o più icone dello strumento desiderato, cliccare su **UA Manuale** e poi selezionare il metodo di campionamento, il colore e la limpidezza del campione.
3. Inserire il peso specifico del campione.
4. Selezionare il colore che corrisponde al pH del campione.
5. Se tutte le sostanze chimiche sono nella norma, cliccare **Imposta tutto su negative/normale**. In caso contrario, specificare i risultati appropriati. (Se vengono cambiati solo alcuni risultati, cliccare **Avanti** una volta concluso.)
6. Inserire i commenti e selezionare **Eseguito**.

Per modificare manualmente le proprietà delle UA:

1. Dalla schermata dei risultati, cliccare su **Gestisci risultati**.
2. Cliccare **Modifica manualmente i risultati** e poi selezionare i risultati delle UA da modificare manualmente.
3. Apportare le modifiche e cliccare su **Salva**.

Visualizzare e stampare i risultati

1. Procedere in uno dei modi riportati di seguito:
 - + Per visualizzare i risultati immediatamente dopo il completamento dell'analisi, selezionare il messaggio di avviso **Nuovi Risultati**.
 - + Per visualizzare i risultati acquisiti negli ultimi 7 giorni, selezionare il nome del paziente nella lista **Risultati** dalla Schermata Home.
 - + Per visualizzare i risultati storici:
 - Nella sezione **Risultati** della Schermata Home, selezionare **Ricerca risultati** oppure premere , cercare e selezionare il paziente desiderato e infine cliccare su **Visualizza**.
 - In qualsiasi schermata diversa dalla Schermata Home, cliccare su , cercare e selezionare il paziente desiderato, quindi premere **Visualizza**.
2. Selezionare la scheda che contiene i risultati desiderati.
3. Cliccare su  per stampare il report completo con tutti i risultati del test dalla scheda selezionata.

Manutenzione settimanale

IDEXX consiglia di riavviare il sistema settimanalmente.

1. Cliccare  e poi **Spegni**.
2. Cliccare **Spegni** o **Riavvia**.

Personalizzazione delle impostazioni

È possibile personalizzare l>IDEXX VetLab Station per soddisfare le esigenze della propria clinica. Selezionare , quindi **Impostazioni**.