

# IDEXX VetLab Station

## Guida di consultazione rapida

Per ulteriori informazioni sull'uso della IDEXX VetLab\* Station (come l'aggiunta di test a un'analisi, la riassegnazione dei risultati e l'immissione dei risultati del test SNAP\*), visitare [idexx.com/product-info](http://idexx.com/product-info) e/o [learn.idexx.com](http://learn.idexx.com).




## Navigazione nella schermata Home

### Icone di stato dello strumento

Permettono di sapere quali strumenti sono in esecuzione e/o disponibili attraverso icone codificate a colori.

- **Verde (pronto)** – Connesso e comunicante
- **Giallo (occupato/standby)** – In uso o in modalità standby
- **Grigio (offline)** – La connessione si è interrotta
- **Rosso (avviso)** – Si è verificato un problema: premere l'icona per ulteriori informazioni

### Centro messaggi


Cliccare  per visualizzare le notifiche da IDEXX.

### Indicatore IDEXX SmartService

Il colore del pallino indica lo stato della connessione di IDEXX SmartService\* Solutions:

- **Verde** – Connesso
- **Giallo** – Connessione in corso
- **Grigio** – Disabilitato
- **Rosso** – Offline

### Icona ingranaggio


Cliccare  per aprire un menu in cui si può accedere a schermate specifiche dello strumento, personalizzare le impostazioni, ricevere assistenza, visualizzare i messaggi o spegnere il sistema.

### Puntini di sospensione (...)

Cliccare "..." per opzioni che permettono di visualizzare la lista Censimento o per eliminare le richieste dalla lista In attesa.

### Lista In attesa

Vedere quali pazienti hanno richieste aperte nel sistema integrato di gestione delle informazioni della clinica (PIMS).

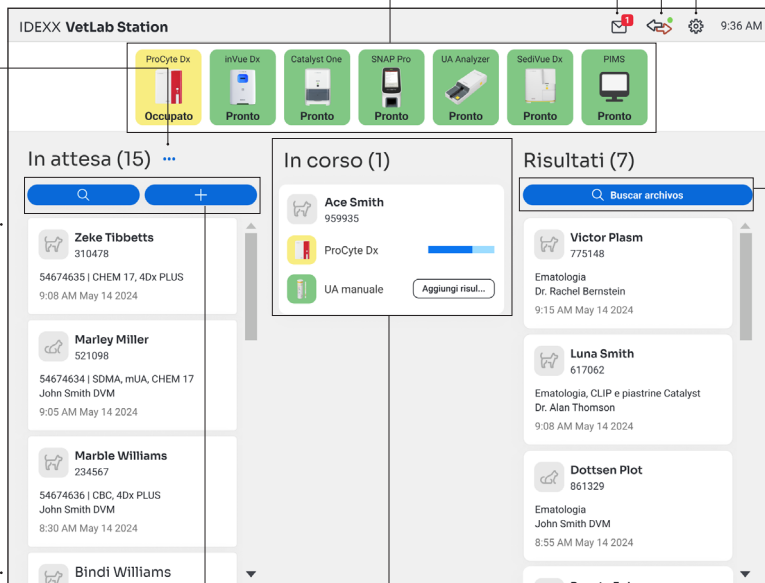

### Ricerca documenti

Cercare i documenti dei pazienti.

### Risultati

Vedere la lista dei risultati del paziente interni creata negli ultimi 7 giorni. Cliccare per selezionare un paziente e visualizzare o stampare i risultati.


### Pulsanti Cerca e Aggiungi

Cliccare **Cerca** per cercare un paziente nella lista In attesa. Cliccare **Aggiungi** per inserire manualmente le informazioni del paziente.

### Area In corso

Visualizza quali test sono ancora in esecuzione, in attesa di essere eseguiti o richiedono un'azione.

## Avviare un'analisi del campione con un PIMS integrato

1. Selezionare il paziente desiderato dalla lista **In attesa** o **Censimento** nella Pagina iniziale o cliccare  per cercare un paziente nella lista **In attesa**.
2. Selezionare uno o più strumenti desiderati e premere **Esegui**.

## Avviare l'analisi del campione direttamente su IDEXX VetLab Station.

Cliccare  nella Pagina iniziale e poi:

*Se si tratta di un nuovo paziente:*

1. Premere **Aggiungi nuovo paziente** e poi **Avanti**.
2. Confermare/specificare le informazioni sul paziente/ struttura, selezionare le icone dell'uno o più strumenti desiderati e premere **Esegui**.

*Se si tratta di un paziente già presente:*

1. Premere il riquadro **Paziente, Cognome**, o **ID cliente**, quindi iniziare a digitare le informazioni pertinenti. Selezionare il paziente desiderato dalla lista e premere **Avanti**.
2. Confermare/specificare le informazioni sul paziente/ struttura, selezionare le icone dell'uno o più strumenti desiderati e premere **Esegui**.

*Se si tratta di un paziente in emergenza:*

1. Premere **Avvio**.
2. Selezionare i **Tipi** e **Fascia d'età**. Il sistema inserisce automaticamente una marca temporale univoca per identificare il paziente (che può essere utilizzata in seguito durante la riassegnazione dei risultati del test).
3. Selezionare **Avanti**.
4. Selezionare uno o più strumenti desiderati e premere **Esegui**.

## Inserire/modificare manualmente i risultati del test SNAP

### Per inserire manualmente i risultati del test SNAP:

1. Premere sull'icona **SNAP** nell'area In corso o su **Inserire i risultati** nella finestra di dialogo Timer SNAP completato.
2. Selezionare l'immagine che corrisponde alla finestra dei risultati del test SNAP.
3. (Opzionale) Selezionare la scheda **Commenti** e poi inserire il proprio user ID e un commento per questo risultato del test.
4. Cliccare **Salva**.

### Per modificare i risultati del test SNAP:

1. Dalla schermata dei risultati, cliccare su **Gestisci risultati**.
2. Cliccare su **Modifica i risultati manualmente** e poi selezionare il risultato del test SNAP da modificare.
3. Apportare le modifiche e cliccare su **Salva**.

## Inserire manualmente le proprietà fisiche e chimiche delle analisi delle urine



### Per aggiungere le proprietà chimiche e fisiche delle urine durante l'esecuzione:

1. Avviare un'esecuzione delle analisi delle urine.
2. Quando viene richiesto, selezionare una o più icone dello strumento desiderato, cliccare su **UA Manuale** e poi selezionare il metodo di campionamento, il colore e la limpidezza del campione.
3. Inserire il peso specifico del campione.
4. Selezionare il colore che corrisponde al pH del campione.
5. Se tutte le sostanze chimiche sono nella norma, cliccare **Imposta tutto su negative/normale**. In caso contrario, specificare i risultati appropriati. (Se vengono cambiati solo alcuni risultati, cliccare **Avanti** una volta concluso.)
6. Inserire i commenti e selezionare **Eseguito**.

### Per modificare manualmente le proprietà delle UA:

1. Dalla schermata dei risultati, cliccare su **Gestisci risultati**.
2. Cliccare **Modifica manualmente i risultati** e poi selezionare i risultati delle UA da modificare manualmente.
3. Apportare le modifiche e cliccare su **Salva**.

## Visualizzare e stampare i risultati


1. Procedere in uno dei modi riportati di seguito:
  - + Cliccare sul paziente nell'Elenco dei risultati nella pagina iniziale.
  - + Cliccare sul messaggio di avviso di nuovi risultati.
  - + In Risultati della Pagina iniziale, cliccare  **Buscar archivos**, cercare e selezionare il paziente desiderato e poi cliccare **Visualizza**.
2. Selezionare la scheda che contiene i risultati desiderati.
3. Cliccare su  per stampare il report completo con tutti i risultati del test dalla scheda selezionata.

## Manutenzione settimanale

IDEXX consiglia di riavviare il sistema settimanalmente.

1. Cliccare  e poi **Spegni**.
2. Cliccare **Spegni** o **Riavvia**.

## Personalizzazione delle impostazioni

È possibile personalizzare l'IDEXX VetLab Station per soddisfare le esigenze della propria clinica. Cliccare  e poi **Impostazioni**.